

Nouvelles fonctionnalités ajoutées au logiciel Prodigis™

Nous sommes heureux d'annoncer que plusieurs nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées au logiciel Prodigis (version 4.6) pour utilisation avec les appareils Connect 12 et Reveal 16i.

Fonction « Aller à la page » pour les livres avec table des matières et/ou pagination

Vous pouvez désormais naviguer vers n'importe quelle page d'un livre téléchargé qui comporte une table des matières ou des numéros de page.

- Téléchargez un livre.
- Ouvrez le livre.
- À l'extrémité droite de la bannière de boutons, l'icône « Aller à la page » apparaît.
- Cliquez sur l'icône pour choisir la table des matières ou le numéro de page.
- Si la table des matières est disponible, une liste sera présentée; si elle ne l'est pas, un message s'affichera.

Annoter un livre

Les livres peuvent maintenant être annotés avec trois types d'annotations (annotations écrites à l'aide de l'écran tactile, surlignages et notes de texte dactylographiées) lorsqu'ils sont ouverts.

- Cliquez sur l'icône du Stylo dans la bannière des boutons.
- Les options permettant de sélectionner un stylo, une gomme, une palette de couleurs et une épaisseur de trait apparaissent.
- Choisissez le stylo pour créer des annotations manuscrites à l'aide de votre doigt ou d'un stylet.
- Choisissez la gomme pour nettoyer une annotation errante.
- Cliquez sur l'icône Retour pour quitter le mode Annotation.

Remarque : appuyez plusieurs fois sur l'icône du stylo pour accéder aux outils de surligneur et de texte dactylographié.

Ajouter des signets aux livres et aux livres audios

Vous pouvez désormais insérer, nommer/renommer, naviguer et supprimer des signets dans les livres et les livres audio. Dans les livres, les signets peuvent être placés en mode de lecture par page, par colonne ou par ligne.

- Ouvrez un livre.
- Une icône de signet apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.
- Cliquez sur l'icône lorsque vous souhaitez placer un signet.
- Il sera inséré à l'endroit où la lecture s'est arrêtée.
- Vous pouvez le nommer comme vous le souhaitez, jusqu'à 40 caractères.
- Après sa création, vous pouvez cliquer sur l'icône du signet pour y accéder, le renommer ou le supprimer.

Données d'utilisation

Une fonctionnalité permettant d'envoyer des données d'utilisation anonymes de Prodigy a été ajoutée pour nous aider à comprendre comment le logiciel est utilisé et pour acquérir des informations pour les développements futurs. Les utilisateurs peuvent choisir de ne pas utiliser cette importante fonctionnalité. Les données telles que la langue de la synthèse vocale et de la reconnaissance optique de caractères, l'interface utilisateur sélectionnée, ou les couleurs de contraste utilisées, sont envoyées de manière anonyme.

Mise à jour de l'API de la calculatrice Desmos

Desmos a été mis à jour avec la dernière version 1.6. Deux fonctionnalités clés :

- Applique les tailles de police intégrées dans les paramètres de la calculatrice.
- Utilisation des schémas de couleurs Prodigy lorsqu'ils sont sélectionnés.

Connecter une caméra Kodak SL10 ou SL25 au Reveal 16i

Le logiciel Prodigy permet maintenant de connecter la caméra PixPro pour l'utiliser comme une caméra à distance supplémentaire au Reveal 16i.

- Allumez la caméra.
- Allez dans Prodigy > Paramètres > Système > Wi-Fi.
- Choisissez la caméra et entrez son mot de passe.
- Une icône de distance apparaîtra maintenant dans le carrousel pour utiliser la caméra.

Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à contacter votre service technique HumanWare.